



Pompanın pozisyonu
Pompayı düz bir zemin üzerine yerleştirin veya pompayı, varsa serum askısına asın.



Damla haznesini pompaya yerleştirin. Döner klemp yavaşça açarak setin tamamen ürünle dolmasını sağlayın. Bu şekilde setin içerisinde ürünü akıtarak, setin içindeki havayı çıkarın. Klempı kapatın.



Klempı aşağı ve yukarı kaydırarak ürünün akışı ayarlanabilir.



Setin silikon parçasını gererek, döner başlık etrafından geçirin ve plastik parçanın pompadaki oyuğa yerleşmesini sağlayın. Seti pompanın sağ üst ucundaki oyuktan dışarı yönlendirin.





Damla haznesini ve silikon kısmı yerleştirdiğinizden emin olun.



Açma
Açma tuşuna  basarak pompayı açın.




Programlama
 ve  tuşlarına basarak istenen akım hızını (ml/saat) ayarlayın. (1-300 ml/saat arasında 1 ml/saatlik aralıklarla seçim yapabilirsiniz.)





Setin boştaki ucunun koruyucu kapağını çıkardıktan sonra hastanın nutrisyon tüpüne bağlayın.

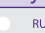

Beslenmeye Geçiş
Setin üstündeki döner klempı yukarıya doğru çevirin ve  tuşuna basarak pompayı çalıştırın.



Kapatma
Pompayı kapatmak için  tuşuna basın; 5 saniye kadar parmağınızı basılı tutarak kapanmasını bekleyin.

DİKKAT  tuşuna basılmasıyla pompa kapanır, ancak cihaz fişe takılıysa şarj olmaya devam eder.

Pompayı kapattığınızda hafızada kayıtlı tüm program silinir. **ÖNEMLİ**

